

| Étiquette patient | Préleveur | Médecin prescripteur | Résultat à renvoyer à | Destinataire |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | Nom : Qualité : Date et Heure | | | Laboratoire d'Hématologie Niveau 4, secteur Broca 78, Rue du Général Leclerc CHU Bicêtre 94274 LE KREMLIN BICETRE cedex Maintien à +4°C impératif |

Rendez-vous obligatoire auprès du Dr Véronique PICARD 01 45 21 35 97 ou 01 45 21 21 21 Dect 14609

ou Dr Fénéant-Thibault 01 45 21 35 79 /35 83

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ektacytométrie | <input type="checkbox"/> Electrophorèse des protéines de membrane |
| <input type="checkbox"/> Test EMA (cytométrie en flux) | <input type="checkbox"/> Etude génétique |

RENSEIGNEMENTS CLINICO-BIOLOGIQUES

Coombs érythrocytaire : Positif Négatif

Hémolyse : OUI / NON

Splénomégalie : OUI / NON

Ictère : OUI / NON

Transfusion : OUI / NON si oui, date :

ATCD familiaux :

Veillez nous adresser

- un bon de commande (si hors AP),
- une copie du CR de consultation ou d'hospitalisation (ou le faire suivre)
- un consentement éclairé (ci joint)

LES ECHANTILLONS DOIVENT IMPERATIVEMENT ARRIVER FROIDS EN MOINS DE 24 HEURES.

- Les prélèvements sont reçus du mardi au jeudi
- Prélever 2 fois 5ml de sang sur vacutainer EDTA (bouchon violet), pour les nourrissons : 2ml minimum.
- Pas de transfusion dans les 3 mois précédents.
- Les tubes doivent être envoyés réfrigérés à +4°C. Ils sont roulés dans « plastique bulle » et placés dans une boîte polystyrène contenant une source de froid : (glace pilée, blocs réfrigérants préalablement préparés à -20°C, mais NON placés au contact direct du prélèvement. PAS DE CARBOGLACE). Inscrire sur le colis, la mention « A conserver au froid »

Conditions d'examen Ektacytométrie & test EMA

Comme convenu, vous trouverez ci-joint la feuille de demande d'Ektacytométrie ou de test EMA. Les prélèvements (2 tubes EDTA) sont reçus du mardi au jeudi, sur RDV. Pour les nourissons un volume de 1,5 à 2 ml est suffisant. Il est important de respecter les conditions d'acheminement (rapide ie<24h, 4°C pour l'ektacytométrie, 48h à température ambiante pour le test EMA). Merci de joindre ou de faire suivre (par courrier, mail ou fax) un CR de consultation ou d'hospitalisation. Un consentement éclairé est demandé en vue de conservation des échantillons pour travaux de recherche ou d'étude génétique si nécessaire